



Morcellationssystem
Versator® TQ



Morcellation in der Gynäkologie „aber sicher“



Handstück



Atraumatischer Obturator



Monitor Versator TQ®

Das Innovative, kraftvolle, ökonomische, sichere Morcellationssystem zur Morcellierung von Gewebe bei laparoskopischen gynäkologischen Eingriffen.

Indikationen:

- Hysterektomie (LASH und TLH)
- Adnektomie
- Myomektomie

Komponenten:

Das Versator® TQ System besteht aus der Antriebseinheit und dem kompletten sterilen Patientenset.

Patientenset bestehend aus:

- Handstück 15 mm ø / 160 mm Nutzlänge
- Atraumatischer Obturator
- Dichtkappen für den Einsatz von 5 mm und 10 mm Instrumenten
- Antriebswelle
- MorSafe® Morcellations- und Bergebeutel

Das System erlaubt eine in 8 Stufen regelbare Morcellationsgeschwindigkeit von 200 bis 1.600 u/min mit wählbarer Drehrichtung rechts und links mit einem Drehmoment von bis zu 105 N-cm bei 1.000 rpm.

Die Position des Messers sowie der distalen „Nase“ ist jeweils dreistufig am ergonomischen Handgriff durch den Operateur einstellbar.

Der Monitor der Antriebseinheit gibt während der Morcellation Auskunft über die aktuelle Beanspruchung mit Anzeige der Applikationszeit, der Temperatur sowie der aktuellen Belastung.

Alle Komponenten bilden ein Gesamtsystem, welches es ermöglicht eine effektive Morcellation sowie die sichere Entnahme des zu extrahierenden Gewebes ohne Kontakt zum Bauchraum und der Bauchdecke zu gewährleisten (Tissue Containment System).

Versator® TQ und MorSafe®



Antriebseinheit Versator® TQ

1	Stück/VE	Art.-Nr.
1		8M520000

Patientenset, steril

Das Patientenset ist in drei MorSafe® Morcellations-Beutelgrößen sowie ohne Beutel erhältlich.

2	Bezeichnung	Set/VE	Art.-Nr.
	Patientenset mit Beutel Gr. S (1.600 ml)	1	8M520040
	Patientenset mit Beutel Gr. M (2.100 ml)	1	8M520050
	Patientenset mit Beutel Gr. L (2.600 ml)	1	8M520060
	Patientenset ohne Beutel	1	8M520070

MorSafe® Bergebeutel

3	Größe	Stück/VE	Art.-Nr.
	S (1.600 ml)	5	8M520010
	M (2.100 ml)	5	8M520020
	L (2.600 ml)	5	8M520030

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einfaches Handling, kein aufwändiger Zusammenbau im OP
- Hohe Sicherheit durch integrierten „in Bag“ Morcellationsbeutel
- Keine Personal- und Kostenbindung in der AEMP, da Einmalprodukt
- Hohe Effizienz durch immer „frisches“ Messer mit hohem Drehmoment
- Volle Kontrolle durch Anzeige aller Leistungs- und Belastungsparameter im Display
- Ergonomischer Handgriff ermöglicht stressfreies Arbeiten durch individuelle Einstellung des Messers am Griff
- Immer optimale Sicht durch dreistufige Einstellung der distalen Spitze am Griff
- Individuell indikationsbezogen einsetzbar durch drei Beutelgrößen
- Immer die richtige Geschwindigkeit und Drehrichtung durch 8 Stufige Drehzahlregelung sowie rechts/links Lauf

Unsere Vertriebspartner:

SMS medipool

Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
Tel.: +49 6897 7909-0
Fax: +49 6897 7909-99

info@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de

Landsberger Straße 65
D-82110 Germering
Tel.: +49 89 85604-0
Fax: +49 89 85604-210

Burgwedeler Straße 193
D-30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 367664-0
Fax: +49 511 367664-50

sms-nord@sms-medipool.de



Gersteinstraße 7a
D-59227 Ahlen
Tel.: +49 2382 9808-0
Fax: +49 2382 9808-51

info@bursch.de
www.bursch.de

Berthold-Beitz-Boulevard 420
D-45141 Essen



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 